

Instruction d'utilisation

QUICKSHIELD COMPLETE PLUS




Aiguille Visio+ :
visualisation du
retour veineux



1

Retirer le
capuchon de
protection

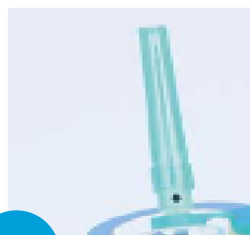

2

Le point sur le
capuchon indique
l'orientation du
biseau



3

Positionner le
bouclier à votre
convenance



4

Effectuer la
ponction
veineuse



5

Percuter et
maintenir
le(s) tube(s)



6

Retirer le(s)
tube(s)



7

Activer la
protection sur un
plan fixe
et stable



7'

OU activer la
protection avec le
pouce



8

Activer jusqu'au
clic sonore



9

Éliminer
l'ensemble dans
un container



Homogénéiser
le(s) tube(s) en
sortie de corps
de pompe