

Instruction d'utilisation

CORPS DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉ QUICKSHIELD VACUETTE®




1 Positionner l'aiguille sur le corps de pompe sécurisé Vacuette®



2 Le point sur le capuchon indique l'orientation du biseau



3 Positionner le bouclier à votre convenance

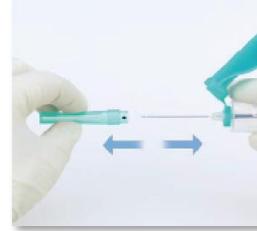

4 Retirer le capuchon



5 Effectuer la ponction veineuse



6 Percuter et maintenir le(s) tube(s)



7 Retirer le(s) tube(s)



8 Activer la protection sur un plan fixe et stable



8' **OU** activer la protection avec le pouce



9 Activer jusqu'au clic sonore



10 Eliminer l'ensemble dans un container



Homogénéiser le(s) tube(s) en sortie de corps de pompe