

# FICHE PRODUIT


- **Dénomination commune** : Autopiqueur à usage unique
- **Dénomination commerciale** : Autopiqueur à usage unique DIABTOP
- **Classe de DM** : IIa
- **Nomenclature Douanière** : 9018390000
- **Code GMDN** : 61578
- **Marquage CE** : 0197, Règlementation (UE) 2017/145
- **Obtenu le (ou réédité le)** : 13/04/2023
- **Date de déclaration ANSM** : en cours
- **Code LPP individuel** : N/A
- **Nomenclature LPP** : N/A



## DESCRIPTIF TECHNIQUE :

DETAILS	
Lame :	Acier inoxydable
Corps :	Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
Mode de stérilisation :	Irradiation
Péremption :	5 ans
Conditions de stockage :	À conserver dans un environnement frais, sec, propre, ventilé et exempt de gaz corrosifs
Contenu de l'emballage :	50 lancettes stérilisées, emballées individuellement, directement dans une boîte de protection scellée
Utilisation prévue :	Les lancettes sécurisées sont des dispositifs médicaux à usage unique, conçus pour prélever des échantillons de sang capillaire. Utilisation par des professionnels de Santé.

## MODE D'EMPLOI :

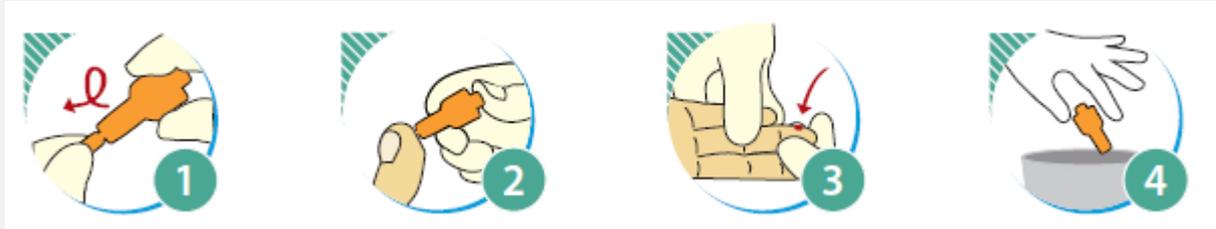

1 - Tourner le capuchon de protection, le retirer et le jeter.

2 - Appuyer sur le bouton de déclenchement pour effectuer le prélèvement sanguin. Exercer une pression sur le site de prélèvement afin d'obtenir le volume de sang souhaité.

3 - Si le sang ne peut être prélevé, remplacer la lancette de sécurité par une autre, plus appropriée, et répéter les étapes.

4 - La lancette de sécurité doit être jetée dans une boîte à déchets appropriée après utilisation.

## REFERENCES CATALOGUE :

Couleur	Référence	Taille	Code ACL
	AJTOP2818	1,8mm – 28 G	6957138609527
	AJTOP3016	1,6mm – 30G	6957138609534

## DIMENSIONS ET COLISAGE :

	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Boite	100 unités	12	9,8	9	0,293
Carton	40 boîtes/carton	47,4	41,5	27,5	12,7

### Importateur en France :

**ALPHADIAB SAS**

381 avenue Foch

78670 Villennes sur Seine

France

Tel : 01.39.75.51.23

Service Client : [contact@alphadiab.fr](mailto:contact@alphadiab.fr)

Numéro Vert gratuit : 0 805 020 224

### Fabricant :

**Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.**

A01, Plant B, No.278, Hangkong Road,

Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport

Industrial Park), Tianjin 300308,

China

### Représentant Européen :

**Shanghai International Holding Corp.**

**GmbH (Europe)**

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,

Germany